



Kurzanleitung OMRON Connect, Daten exportieren

Erfolgreich Daten exportieren:


App öffnen, das Feld "Blutdruck" berühren




Drücken Sie die drei Punkte um weiter zu fahren




⋮ drücken um weiter zu fahren

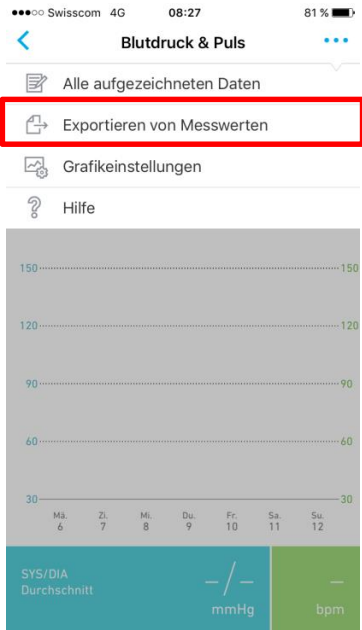


⋮ drücken um weiter zu fahren



Der Zeitraum der Messergebnisse definieren, danach exportieren

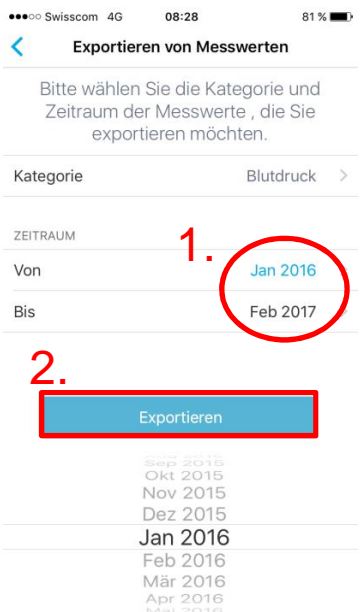


Wir empfehlen Ihnen "Numbers" um die Daten zu exportieren



Kurzanleitung OMRON Connect, Daten exportieren

⌵ drücken um weiter zu fahren

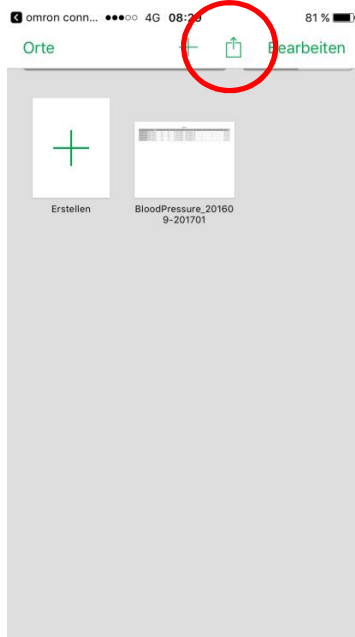

⌵ drücken um weiter zu fahren



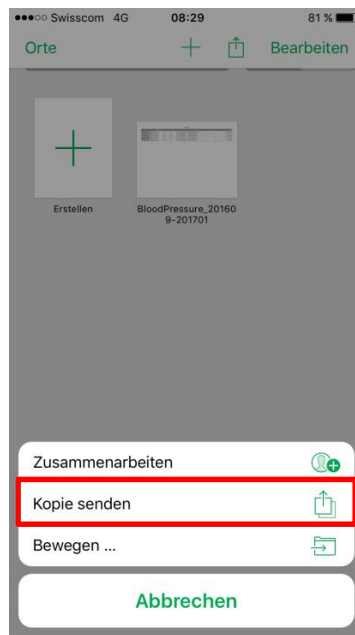



Tabelle wählen ⌵

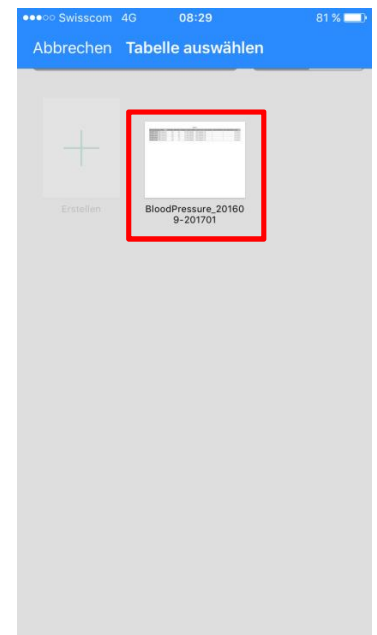

Gewünschtes Format wählen.
Wir empfehlen PDF oder Excel

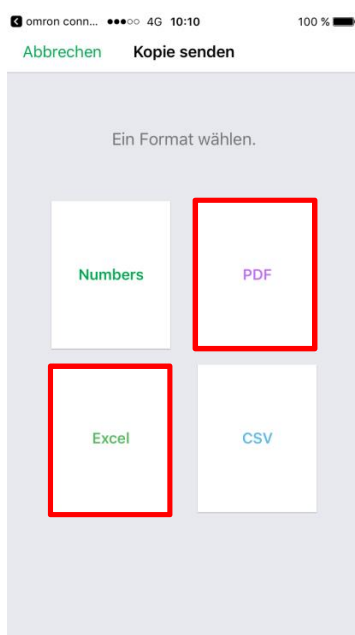

Zielort für die Exportdatei aussuchen.
Wir empfehlen per E-Mail

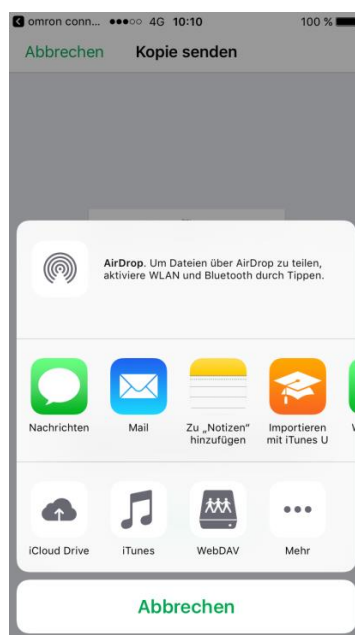

Senden Sie sich die Datei an Ihren eigenen E-Mail Account. Sie haben die Möglichkeit die Daten an Ihren Computer oder Laptop nach Ihren Wünschen weiter zu bearbeiten.