

Kurzanleitung OMRON Connect, Daten exportieren

Erfolgreich Daten exportieren:

App öffnen, das Feld "Blutdruck" berühren

Drücken Sie die drei Punkte um weiter zu fahren

☰ drücken um weiter zu fahren

☰ drücken um weiter zu fahren

Der Zeitraum der Messergebnisse definieren, danach exportieren

Senden Sie sich die Datei an Ihrem eigenen E-Mail Account.

Sie haben die Möglichkeit die Daten an Ihrem Computer oder Laptop nach Ihren Wünschen weiter zu bearbeiten.