

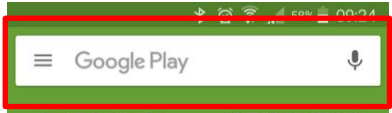
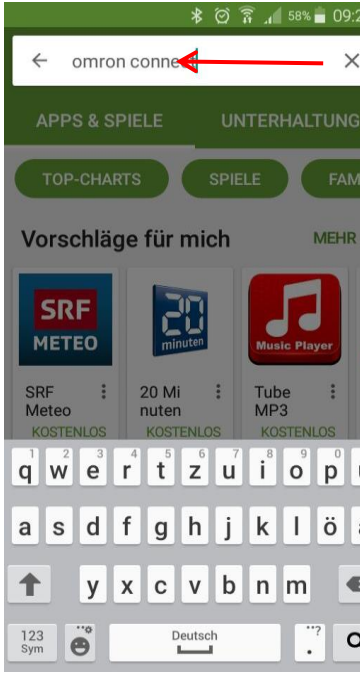
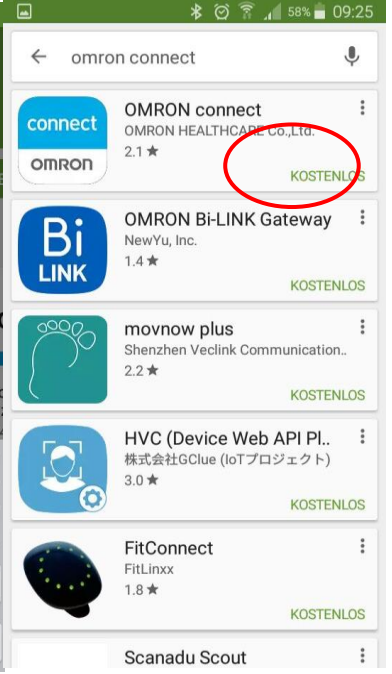


## Guide rapide OMRON Connect (Android)

Exigence : smartphone Android 4.4 ou plus récent  
et Bluetooth doit être activé !

Télécharger l'application avec succès :

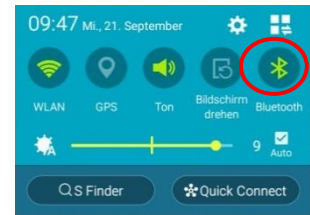

<p>Ouvrez Google Play Store</p> 	<p>Le champ de recherche apparaît</p> 	<p>Entrez OMRON Connect dans le champ de recherche</p> 	<p>Charger l'application, puis ouvrir</p> 
--	---	--	--

Connecter l'appareil à Android avec succès :

Les premières 4 pages sont informatives et montrent les différentes possibilités de cette applicator


**OMRON connect**  
Synchronisiert Messungen drahtlos mit Ihrem Smartphone, sodass Sie Ihre Gesundheitsdaten bequem anzeigen, speichern und verwalten können.

**Get Connected**  
Übertragen Sie Ihre Messungen nach einer einfachen, geführten Installation auf Ihr Smartphone.

**Jederzeit zugreifen**  
Ihre letzten Aktivitäten und Ihr persönlicher Gesundheitsverlauf sind über das intuitive Dashboard ständig verfügbar.

**Fortschritt sehen**  
Gesundheitsdaten werden in klaren und aussagekräftigen Diagrammen dargestellt, mit deren Hilfe Sie Ihre Gesundheitstrends sehen können.

Premiers pas :

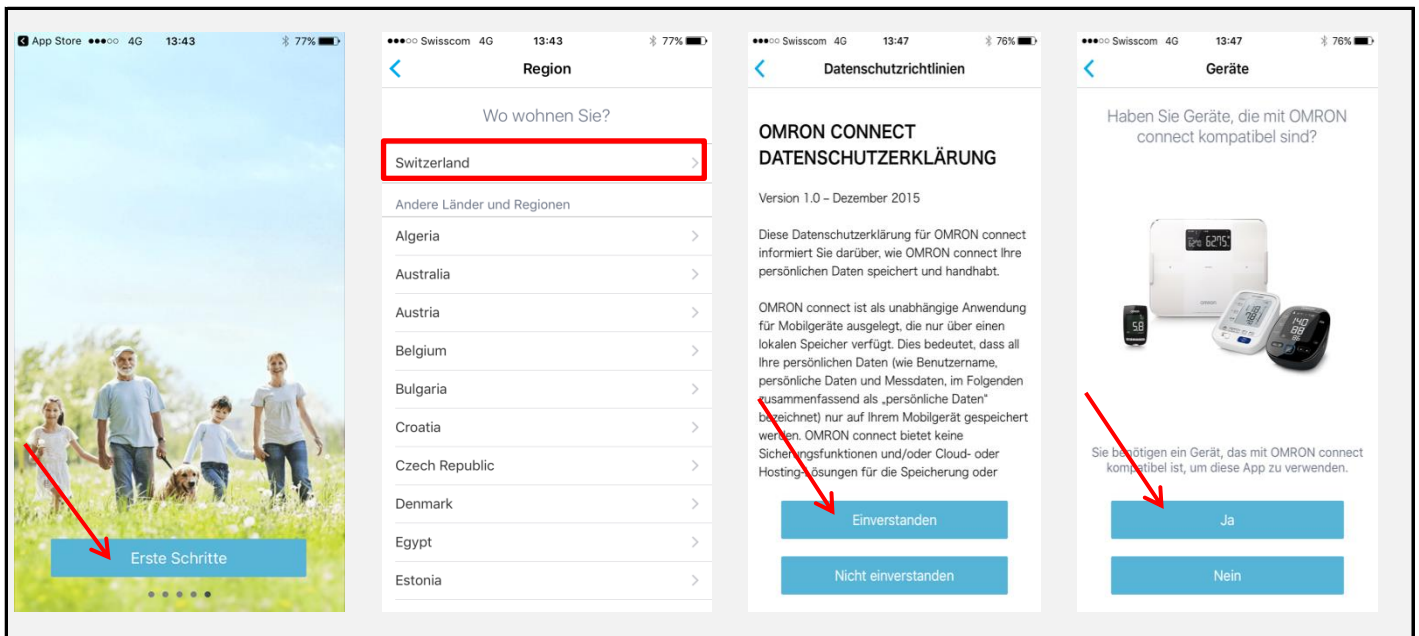

! Préparez l'appareil OMRON que vous voulez connecter (par exemple le M7 Intelli IT)


Sélectionnez M7 Intelli IT

Confirmer


↵ Appuyez sur la touche pour coupler le tensiomètre avec le smartphone Android



Le couplage du smartphone Android et du tensiomètre OMRON est en cours...

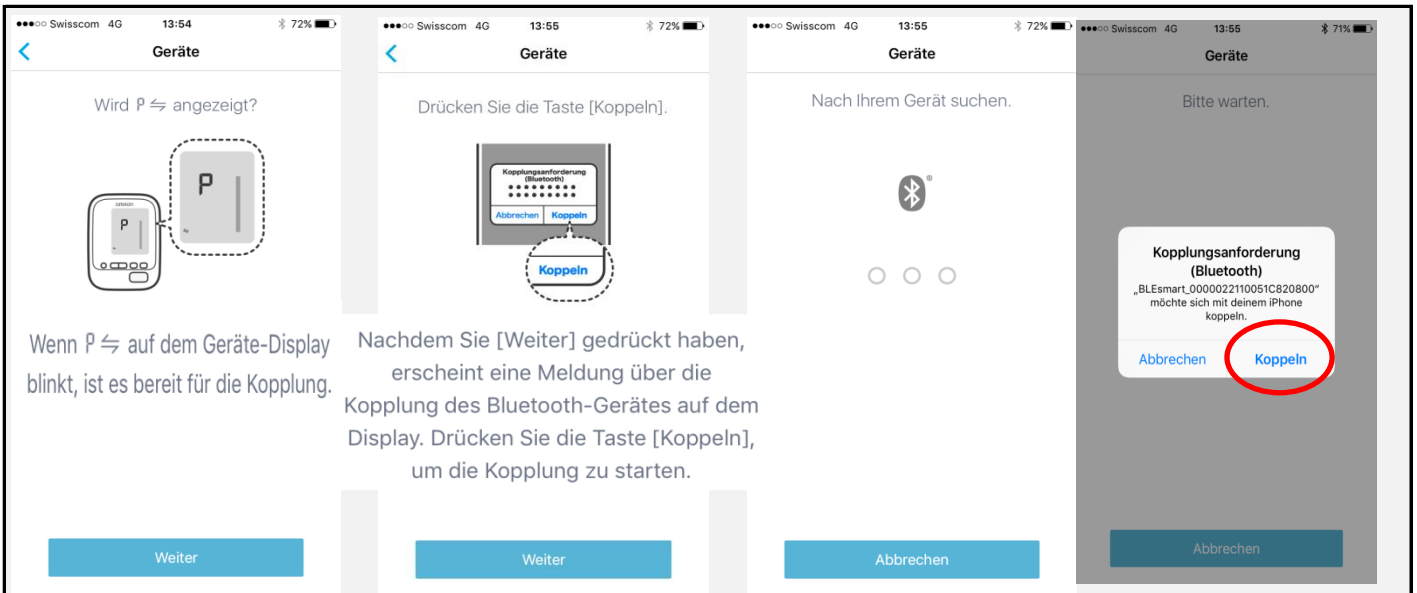

pour la transmission manuelle de données

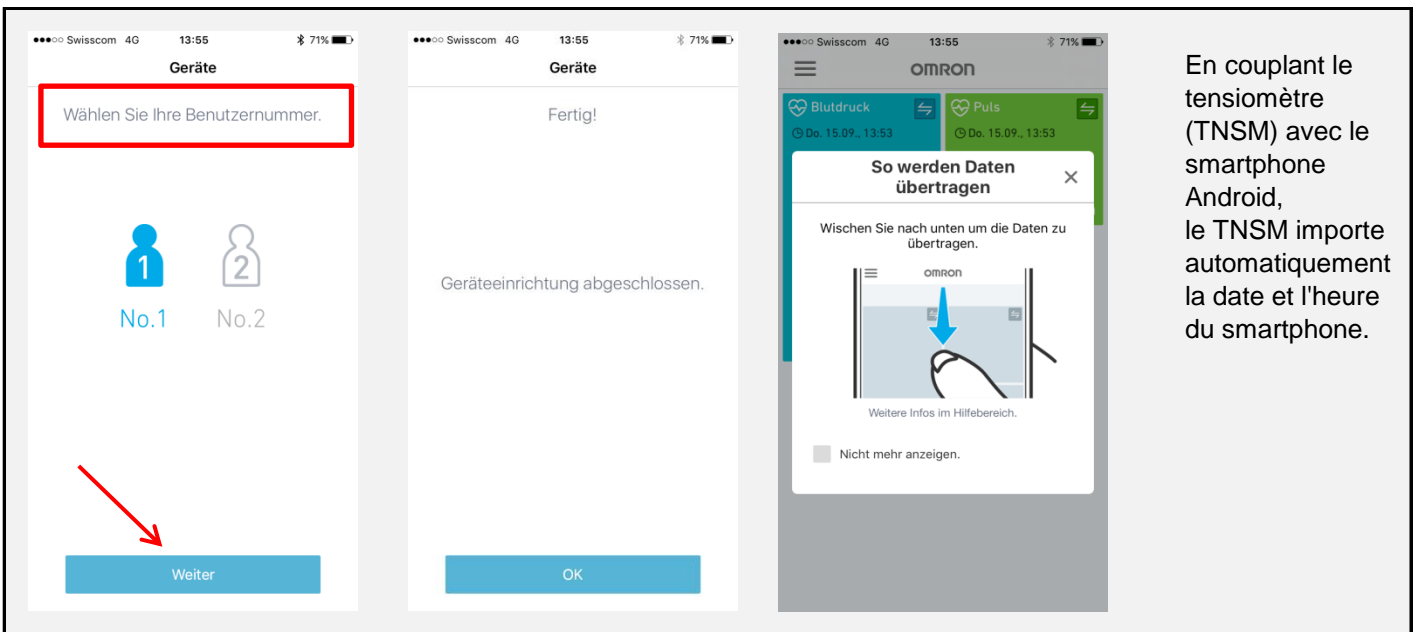

En couplant le tensiomètre (TNSM) avec le smartphone Android, le TNSM importe automatiquement la date et l'heure du smartphone.

Options de visualisation de l'écran

