


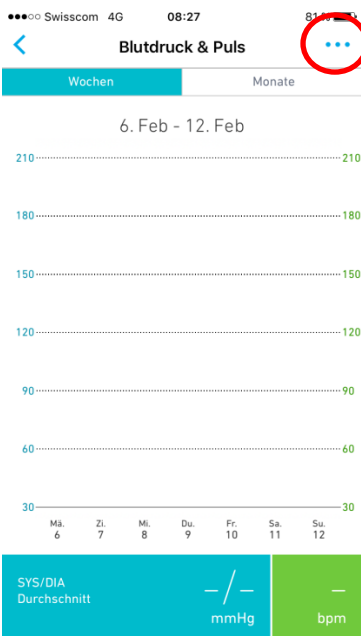
Guide rapide OMRON Connect (iPhone), exporter les données

Exporter les données avec succès :


Ouvrir l'application et touchez le champ "tension artérielle"




Appuyez sur les trois points afin de poursuivre




... appuyez ici pour continuer

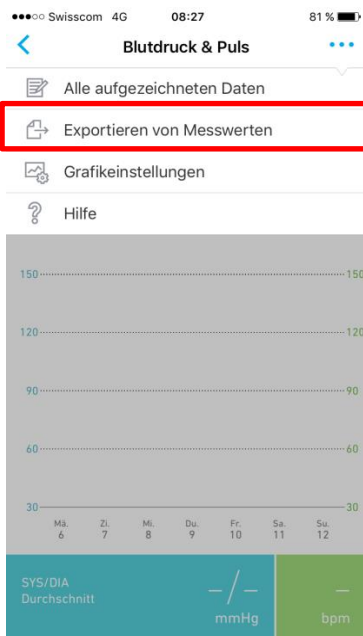


... appuyez ici pour continuer



Déterminez la période des résultats des mesures puis appuyez sur la touche "exporter"




Utiliser par exemple "Numbers" pour exporter les données

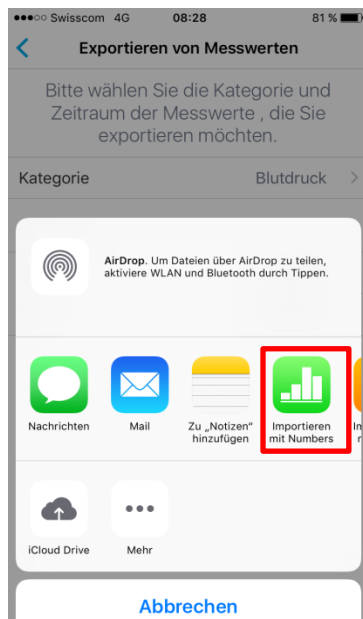


Guide rapide OMRON Connect (iPhone), exporter les données


... appuyez ici pour continuer

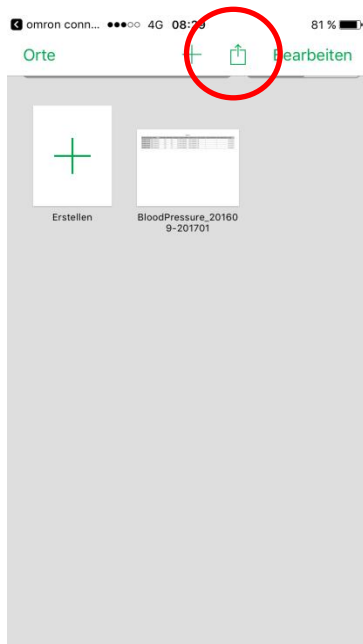


... appuyez ici pour continuer

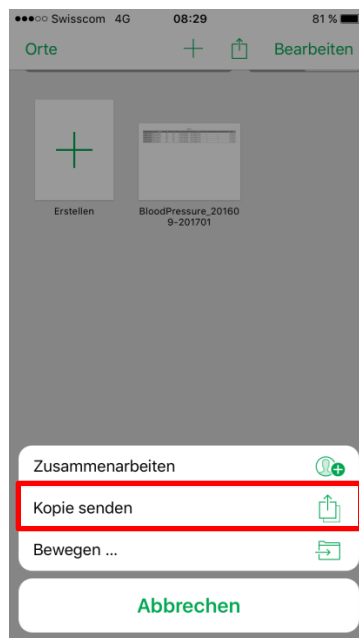


... sélectionnez "tableau"

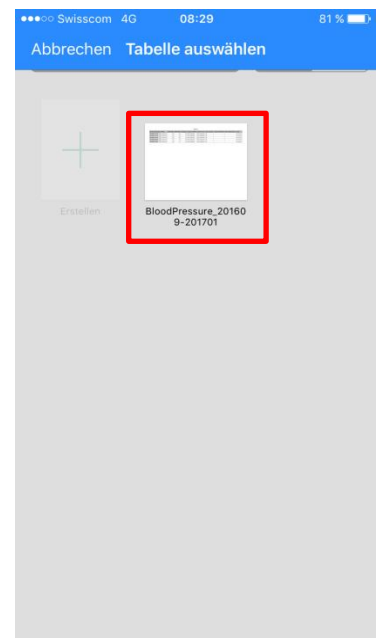

Sélectionnez le format souhaité, soit PDF ou Excel.

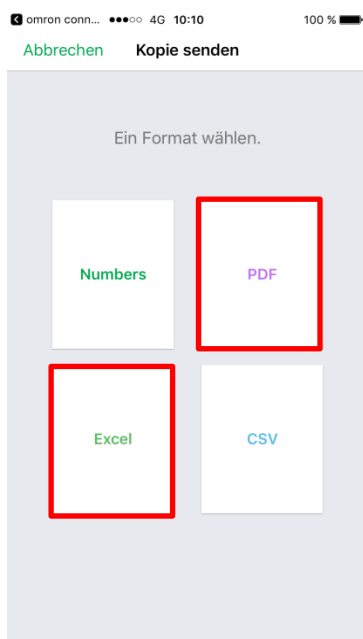

Sélectionnez le programme pour l'exportation. Nous vous recommandons par e-mail

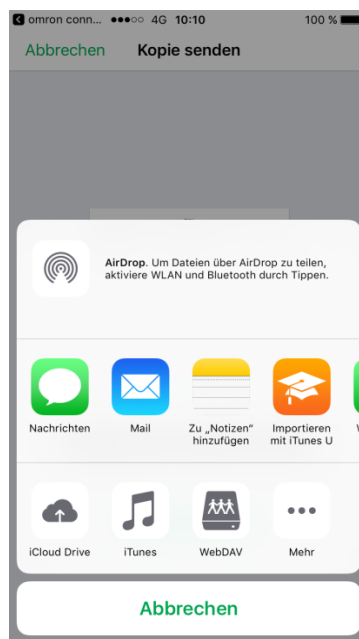

Envoyez le fichier à votre propre adresse email. Ensuite, vous avez la possibilité de modifier les données sur votre ordinateur (portable) en fonction de vos besoins.