


## Guide rapide OMRON Connect (iPhone)

Exigence : iPhone 4S ou plus récent  
et Bluetooth doit être activé !




Télécharger l'application avec succès :

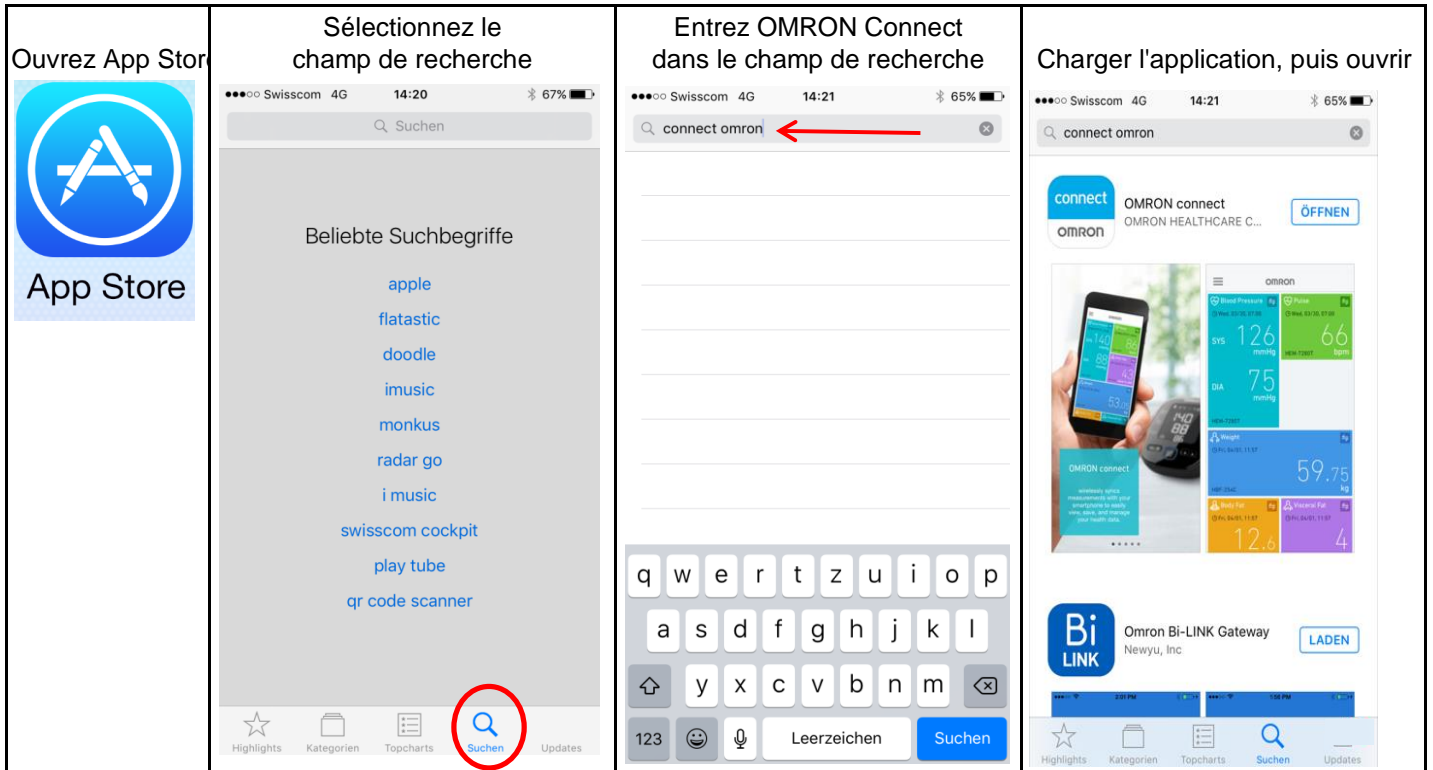


Connecter votre iPhone avec succès :

Les premières 4 pages sont informatives et montrent les différentes possibilités de cette application

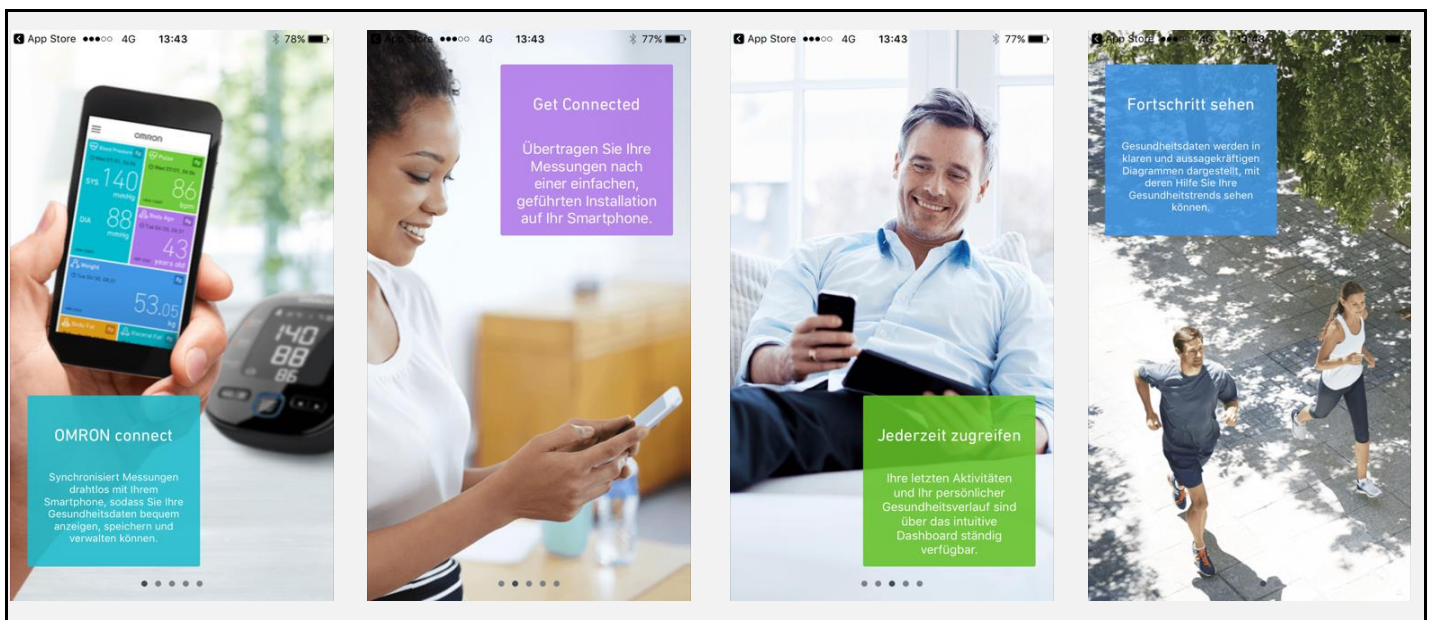

Premiers pas :

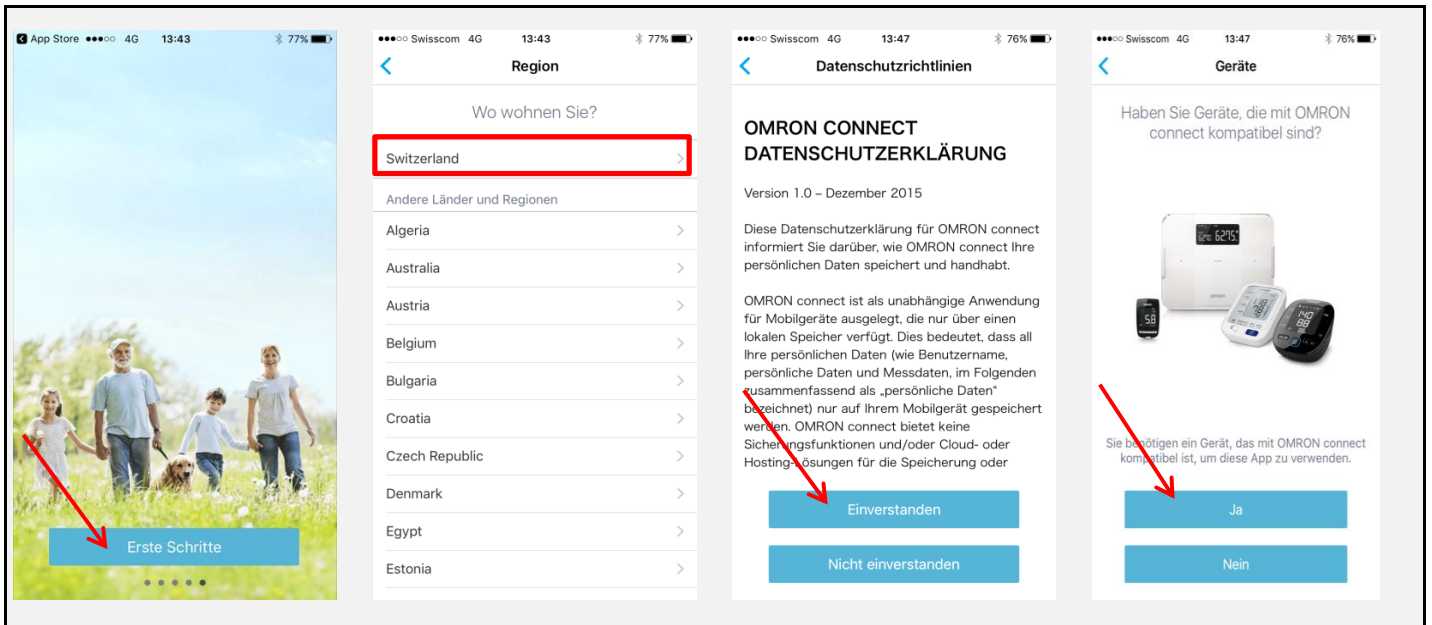


! Préparez l'appareil OMRON que vous voulez connecter (par exemple le M7 Intelli IT)


Sélectionnez M7 Intelli IT

Confirmer


⇌ Appuyez sur la touche pour coupler votre tensiomètre avec le iPhone

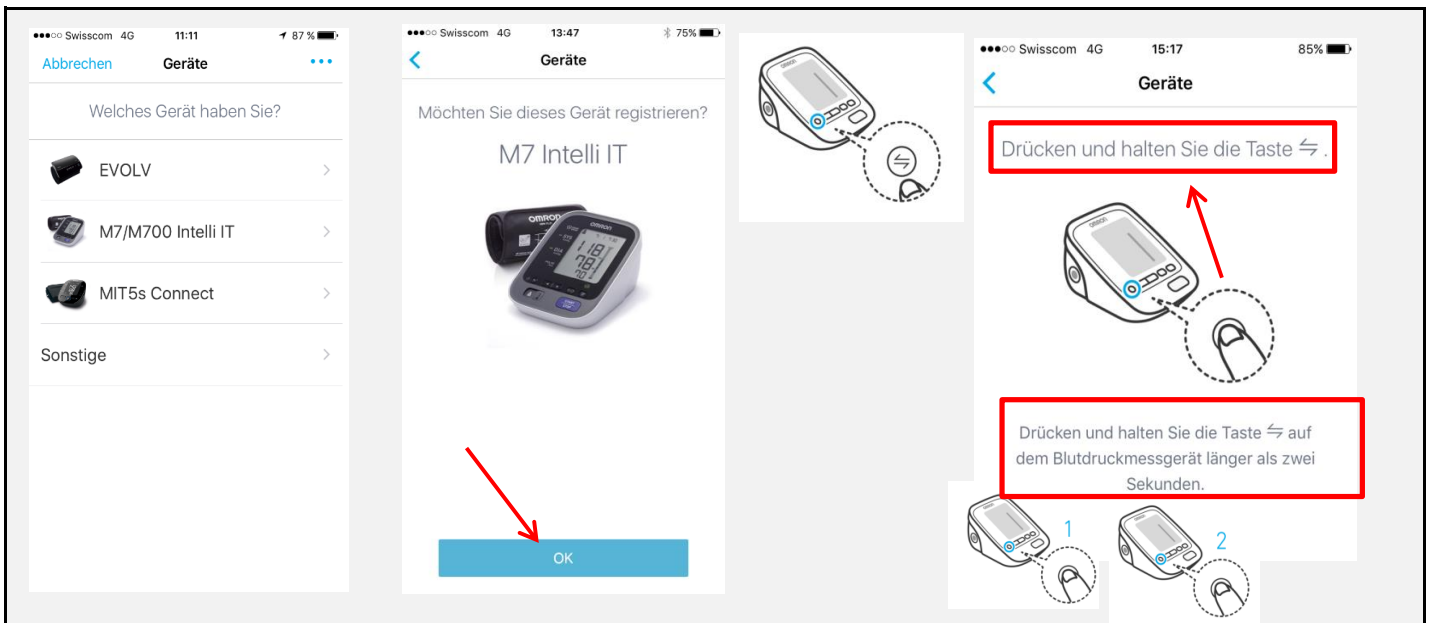

Le couplage du iPhone et du tensiomètre OMRON est en cours...

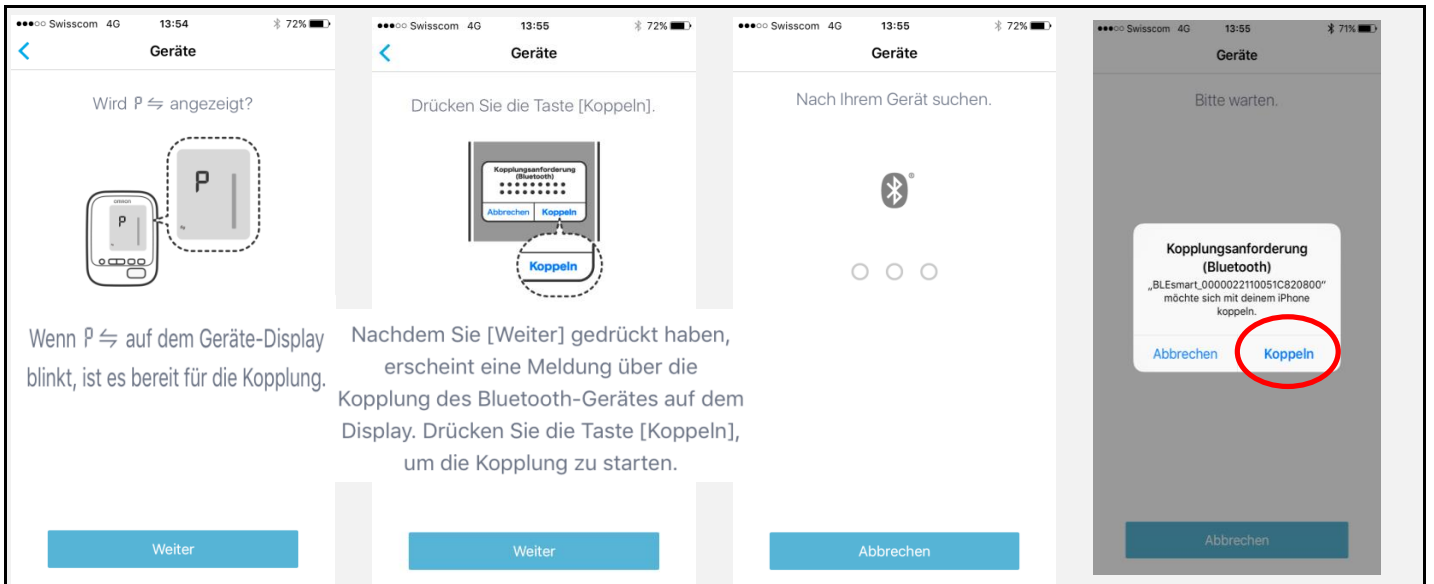

pour la transmission manuelle de données

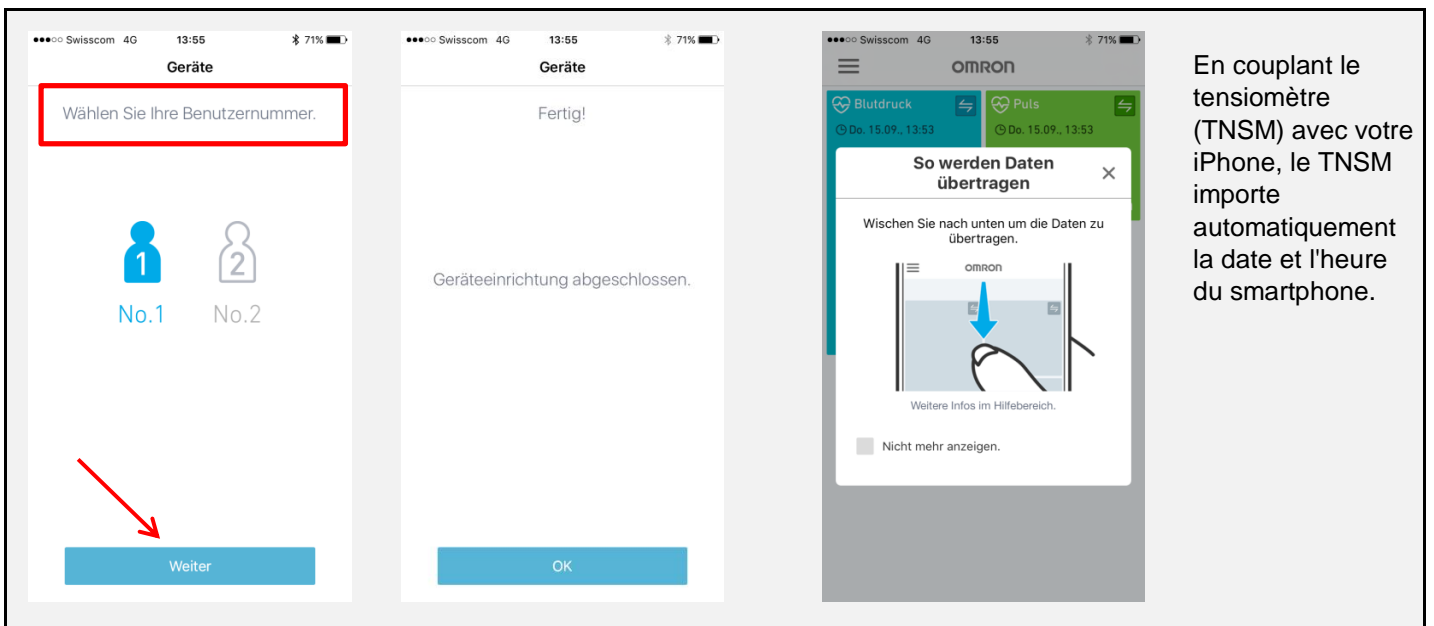

En couplant le tensiomètre (TNSM) avec votre iPhone, le TNSM importe automatiquement la date et l'heure du smartphone.

Options de visualisation de l'écran

