

Istruzioni brevi OMRON Connect

Condizione: Android Smartphone 4.4 o un modello più novo, Bluetooth deve essere attivo!

Come scaricare l'app con successo:




<p>Aprire App Store</p>	<p>Campo di ricerca appare</p>	<p>Inserire nel campo di ricerca</p>	<p>scaricare e aprire l'app.</p>
-------------------------	--------------------------------	--------------------------------------	----------------------------------

Collegamento dell'apparecchio OMRON e il cell. Android con successo:

Le prime quattro pagine sono informative e presentano varie possibilità con questa app.

<p>OMRON connect</p> <p>Synchronisiert Messungen drahtlos mit Ihrem Smartphone, sodass Sie Ihre Gesundheitsdaten bequem anzeigen, speichern und verwalten können.</p>	<p>Get Connected</p> <p>Übertragen Sie Ihre Messungen nach einer einfachen, geführten Installation auf Ihr Smartphone.</p>	<p>Jederzeit zugreifen</p> <p>Ihre letzten Aktivitäten und Ihr persönlicher Gesundheitsverlauf sind über das intuitive Dashboard ständig verfügbar.</p>	<p>Fortschritt sehen</p> <p>Gesundheitsdaten werden in klaren und aussagekräftigen Diagrammen dargestellt, mit denen Sie Ihre Gesundheitstrends sehen können.</p>
--	---	--	--


I primi passi da fare:

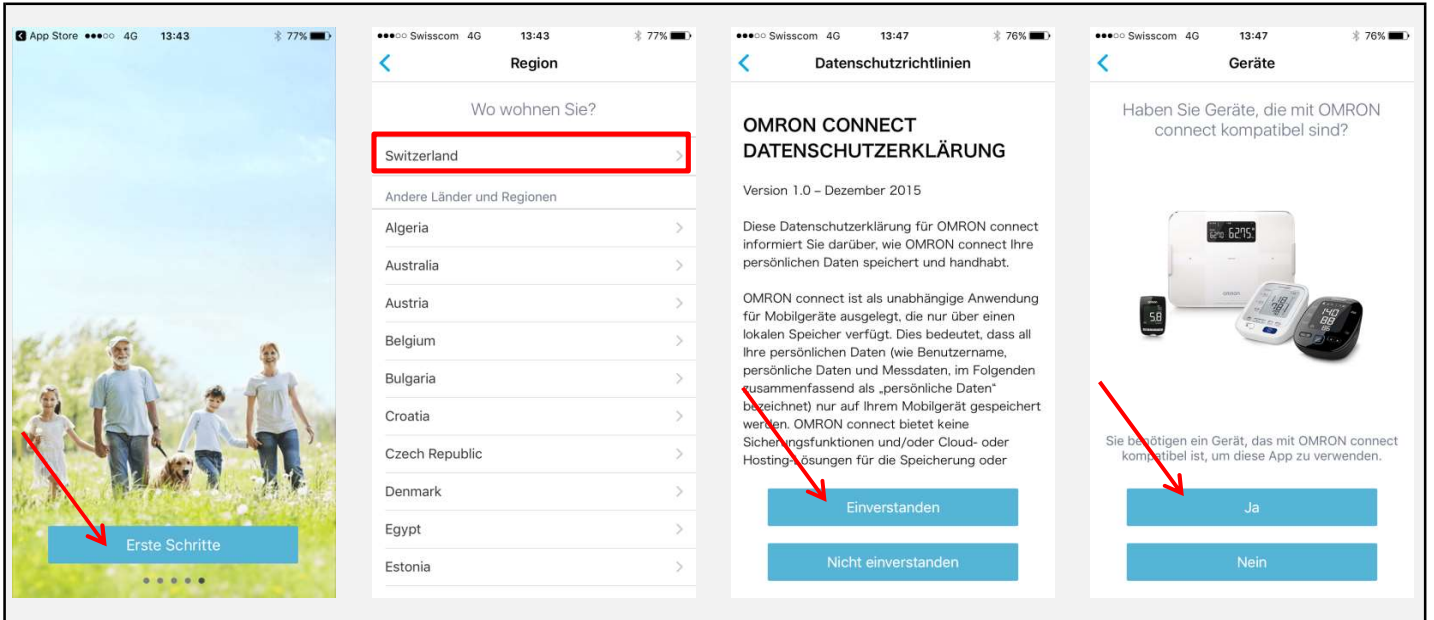

! Preparare il dispositivo per esempio OMRON M7 Intelli IT da utilizzare e conservarlo nelle vicinanze.


scelire M7 Intelli IT

Confermare


 Premere il tasto per abbinare il tensiometro allo smartphone Android.



L'accoppiamento dello smartphone Android e del tensiometro OMRON è in funzione...

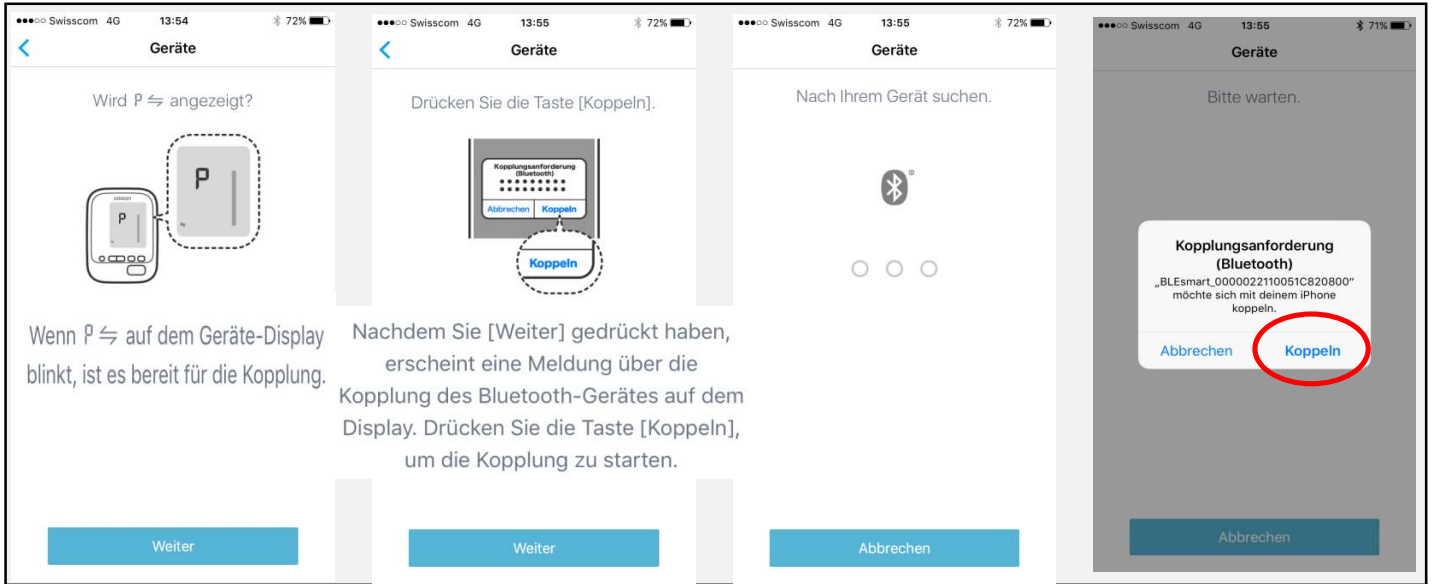

Informazione:

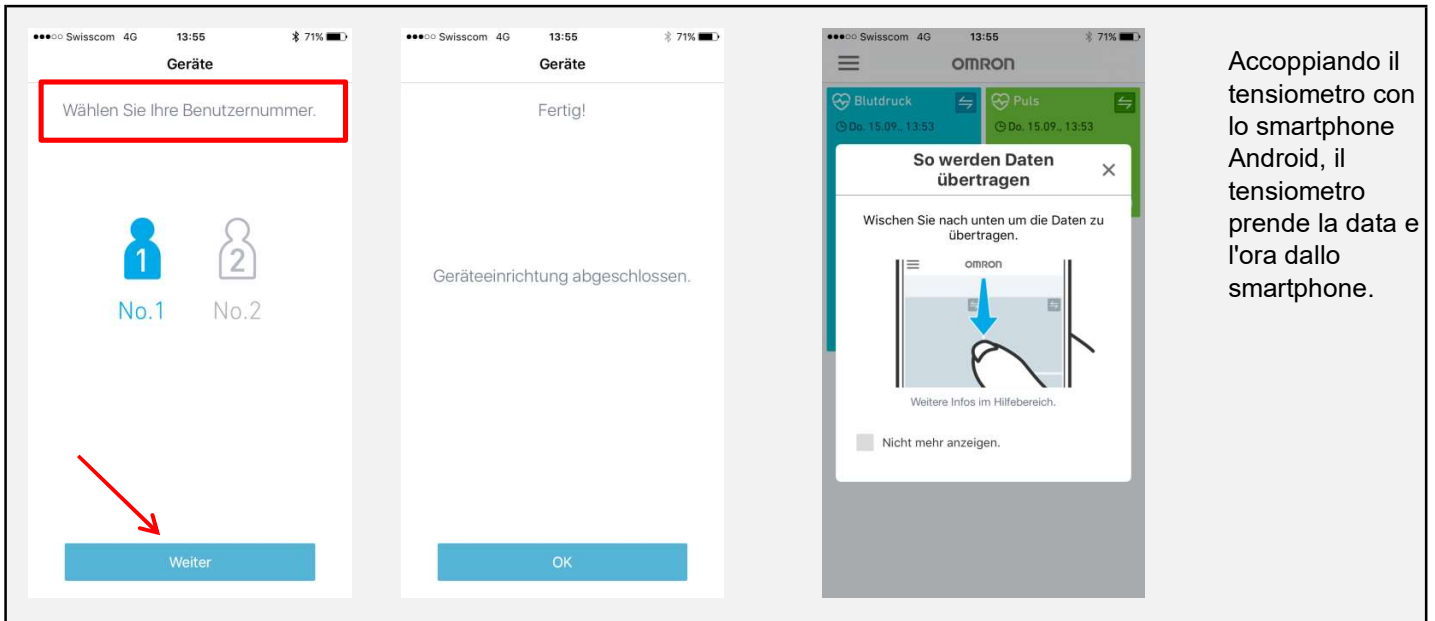

Per cambiare la struttura dell'apparenza

