


Istruzioni brevi OMRON Connect

Condizione: iPhone 4S o un modello più novo, Bluetooth attivato!




Come scaricare l'app con successo:

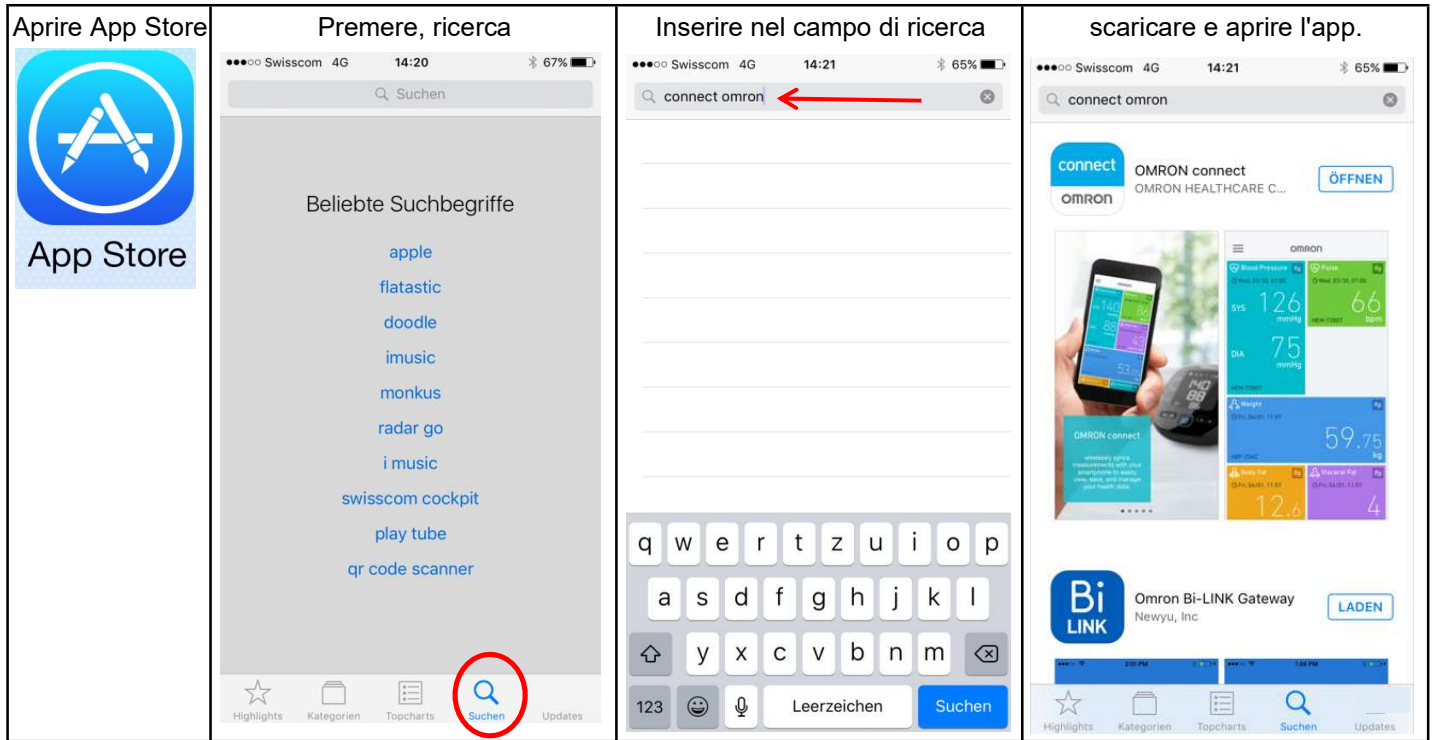


Collegamento dell'apparecchio OMRON e il cell. iPhone con successo:

Le prime quattro pagine sono informative e presentano varie possibilità con questa app.

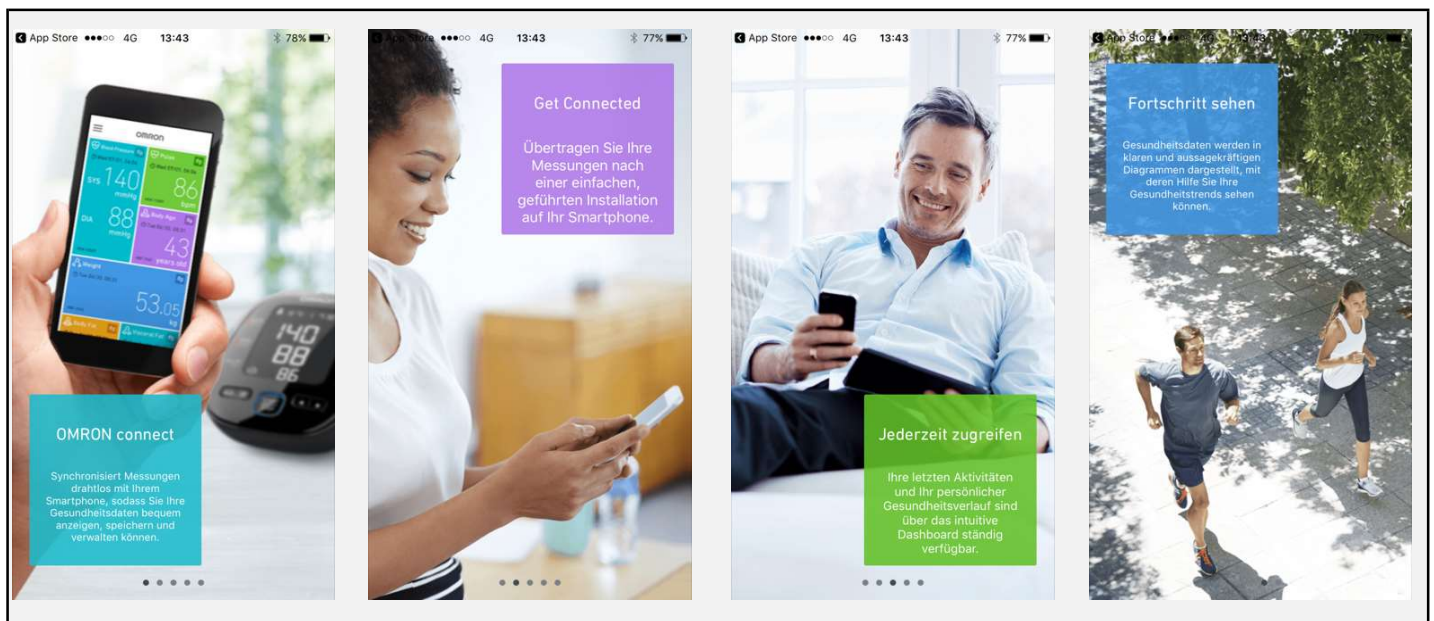


I primi passi da fare:

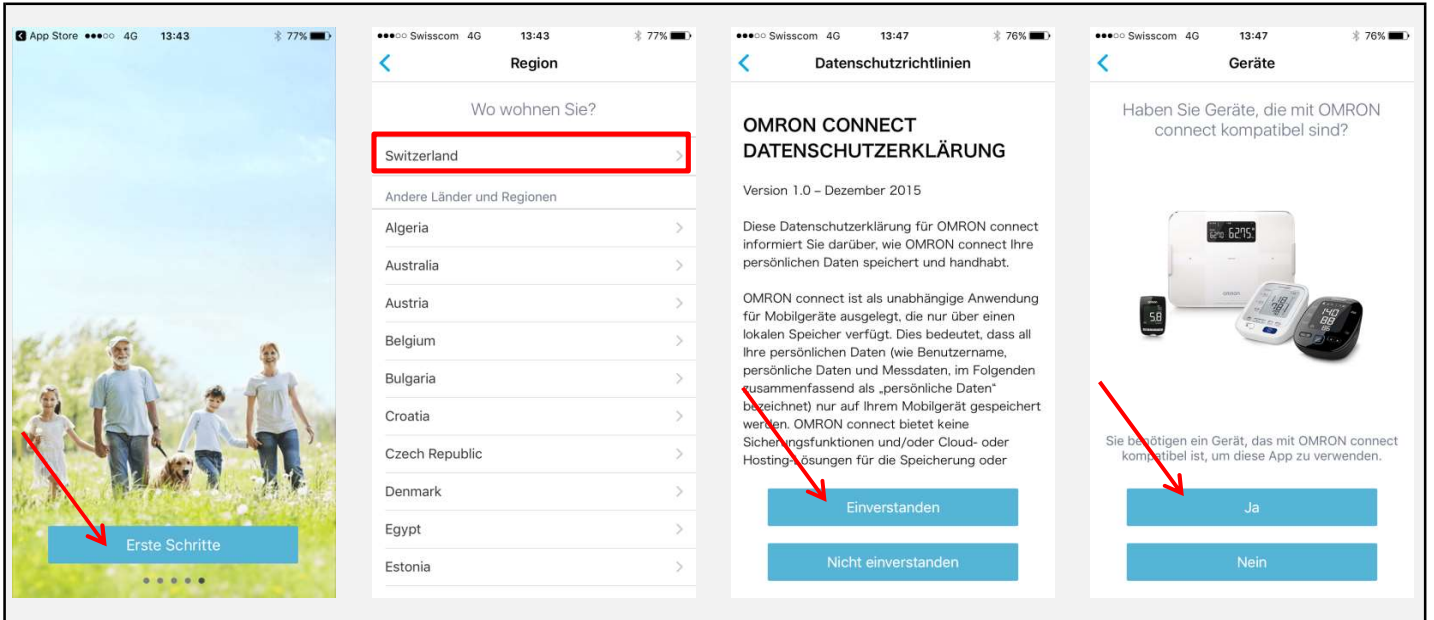


! Preparare il dispositivo per esempio OMRON M7 Intelli IT da utilizzare e conservarlo nelle vicinanze.


scelire M7 Intelli IT

Confermare


 Premere il tasto per abbinare il tensiometro all' iPhone

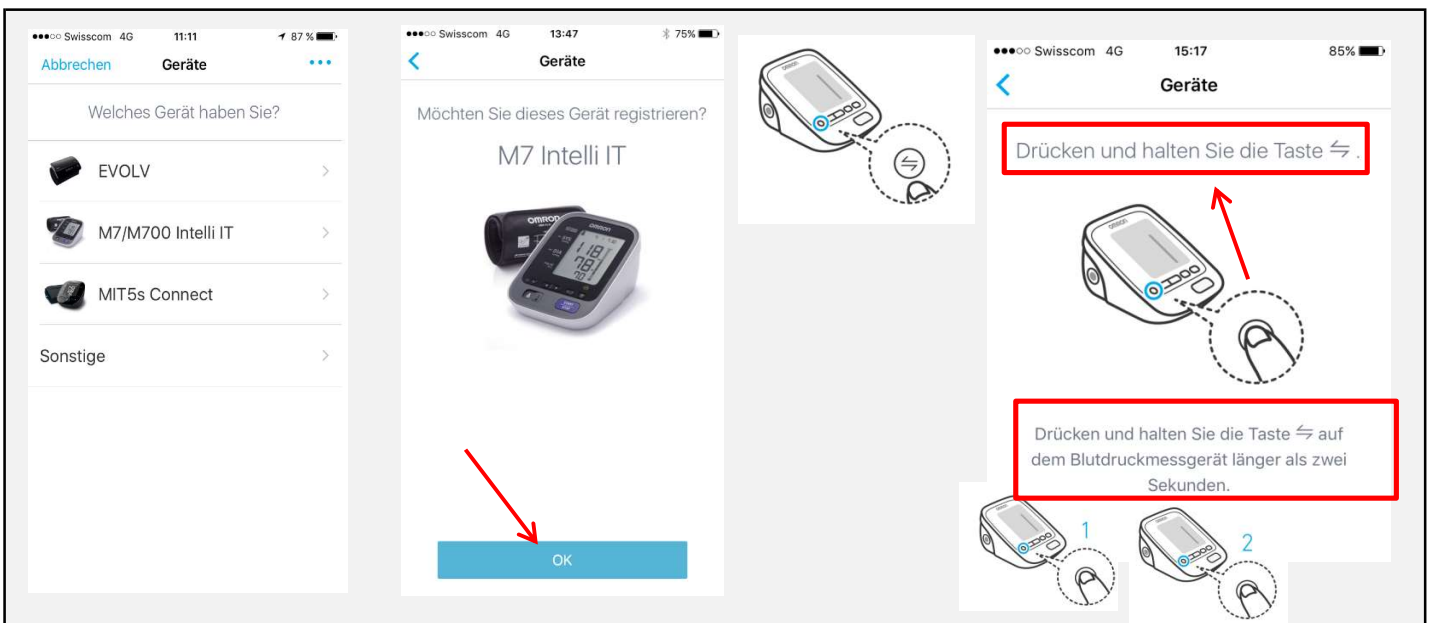

L'accoppiamento del iPhone e del tensiometro OMRON è in funzione...

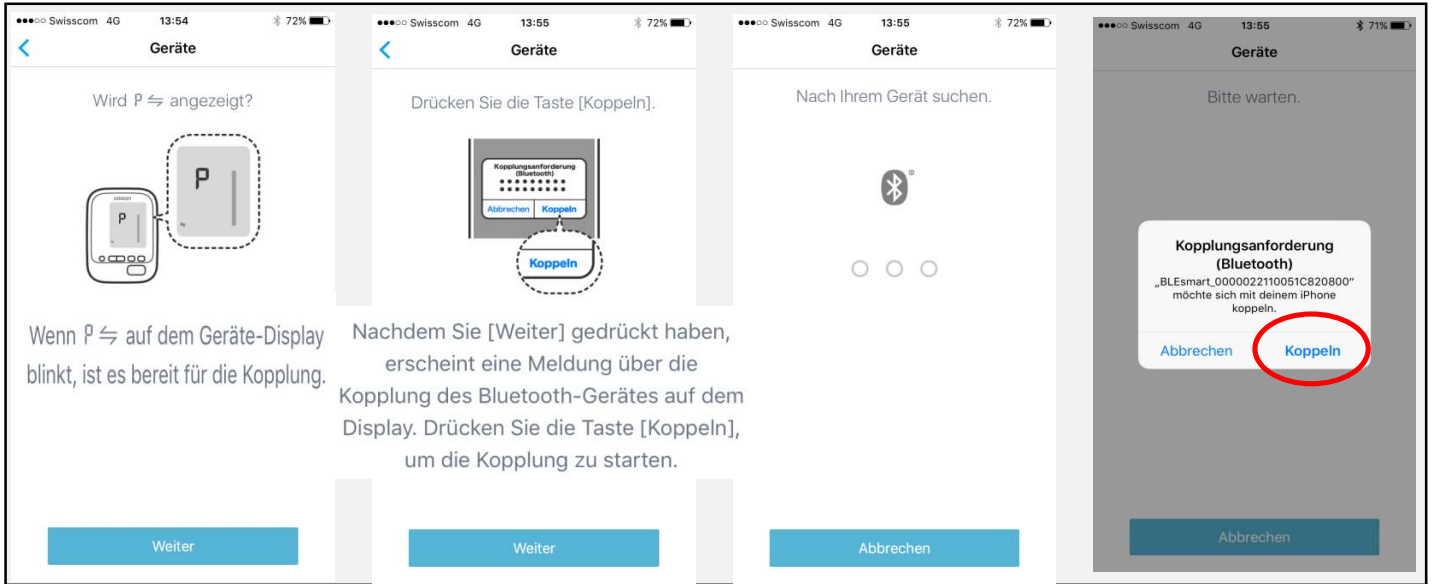

Informazione:

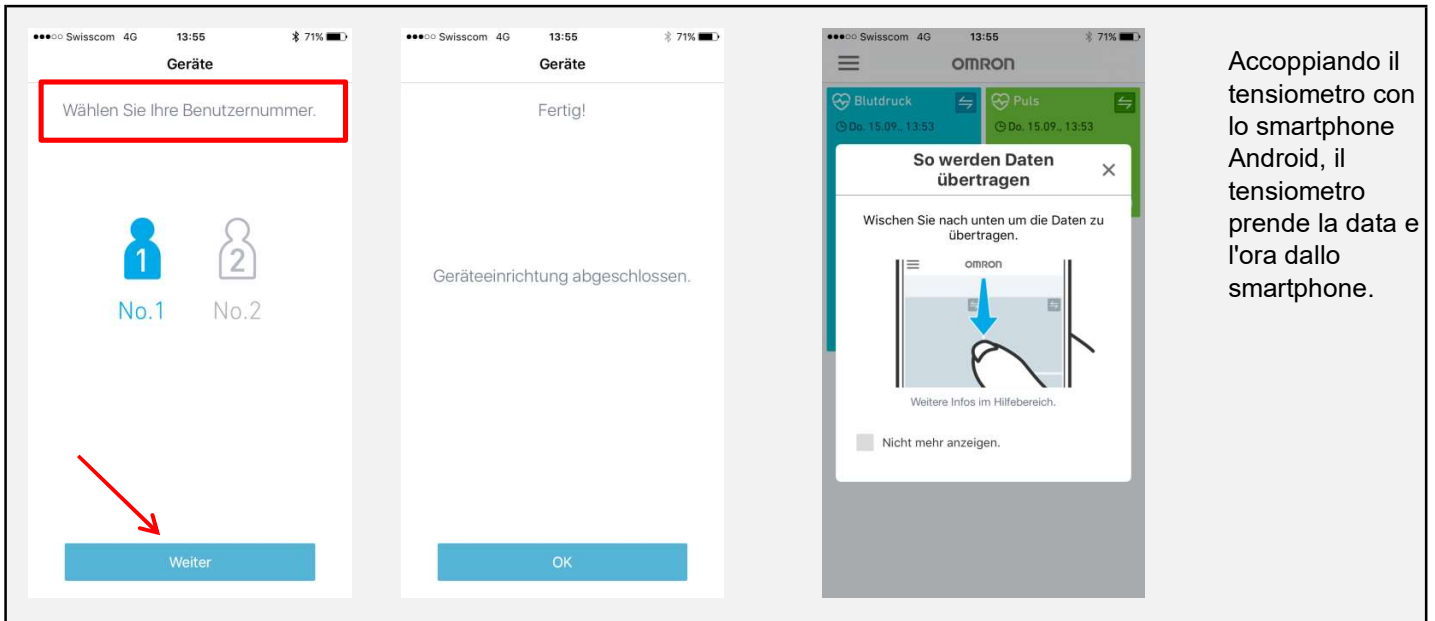

Accoppiando il tensiometro con lo smartphone Android, il tensiometro prende la data e l'ora dallo smartphone.

Per cambiare la struttura dell'apparenza

